



Skin- Peeler ultra

La combinazione ideale per
una pelle giovane e vitale.

SkinPeeler ultra

La combinazione ideale per una pelle giovane e vitale.

Lo SkinPeeler Ultra combina 2 tecnologie del mondo dell'estetica: microdermoabrasione (MDA) e ultrasuoni, per il ringiovanimento della pelle nel modo più elegante e delicato possibile.

Microdermoabrasione

La MDA con cristalli è un metodo collaudato e scientificamente provato per la rimozione controllata dello strato corneo della pelle. Originariamente sviluppato per uso medico, è ora il peeling perfetto per il miglioramento estetico e cosmetico della pelle. Strato dopo strato, le cellule morte in eccesso vengono rimosse con un getto di cristalli finissimi erogati da un ugello, in modo preciso e con il massimo comfort. La carica rigenerativa rinvigorisce il processo di rinnovamento della pelle. Il vacuum agisce anche in profondità: stimola la produzione di Collagene ed Elastina e la rigenerazione dall'interno.

Ultrasuoni

Le onde ultrasonore sono impulsi che rafforzano i poteri rigenerativi naturali della pelle e inibiscono i processi di degradazione ed infiammazione. È un metodo ad azione profonda che promuove e stimola intensamente la rigenerazione della pelle senza provocare lesioni. Fa vibrare i tessuti e le cellule. Queste vibrazioni hanno un effetto sorprendente, perché stimolano importanti processi cutanei. Ma non tutti gli ultrasuoni sono uguali: la frequenza o profondità di penetrazione (MHz) e l'intensità (watt) fanno la differenza.

Ideale per

La microdermoabrasione e gli ultrasuoni estetici sono due metodi di applicazione che possono essere combinati in modo eccellente in un unico trattamento. I due procedimenti si completano efficacemente e lavorano in modo sinergico.

Miglioramento individuale della salute della pelle con:

- ipercheratosi
- pelle con texture grossolana
- rughe
- cellulite
- danni indotti dalla luce
- atrofia
- debolezza vascolare
- barriera cutanea permeabile
- macchie d'età e di pigmentazione



Procedure che accompagnano il trattamento della pelle patologica con

- impurità, inclusi gli inestetismi dell'acne
- teleangectasia fino alla rosacea
- elevata sensibilità alle sostanze atopiche

Medicina estetica

- pre-trattamento con interventi estetici minimamente invasivi come iniezioni per rughe, ecc.
- pre e post trattamento cosmetico con procedure chirurgiche estetiche
- pre trattamento per make-up permanente

SkinPeeler Ultra in breve

PUNTI CHIAVE



Microdermoabrasione altamente performante



Sistema con ingresso per 2 manipoli



Smart System with safety mode

CARATTERISTICHE

Design moderno con touchscreen

- Qualità eccellente delle immagini
- Chiaro contrasto
- Tempo di risposta rapido
- Funzionalità moderne
- Scocca robusta

Smart System with safety mode

- Monitoraggio dei parametri operativi:
- Segnalazione di eccessiva umidità
- Reminder cambio ugello
- Reminder di manutenzione

BENEFICI

- Facile gestione del device e risparmio di tempo prezioso
- Permette di visualizzare in modo rapido e intuitivo tutte le opzioni per scegliere la migliore soluzione possibile per il cliente

- Più sicurezza per voi grazie allo Smart System, per un trattamento senza pensieri
- Promemoria impostati, metodo ideale per lavorare senza problemi sui vostri clienti
- Maggiore durata e resistenza del device

MICRODERMOABRASIONE

Flusso di cristalli e vacuum

Impostazioni e regolazione precisa

- Ampia gamma di opzioni di trattamento: tutti i tipi di pelle e tutte le condizioni cutanee
- Metodo di lavoro adattabile
- Clienti soddisfatti grazie ai risultati perfetti e all'elevato comfort cutaneo

Pompa potenziata

- Microdermoabrasione efficace
- Potente flusso dei cristalli

- Molteplici opzioni di trattamento, da ultra delicato a ultra intenso, per un'offerta ancora più personalizzata per i vostri clienti
- Minor quantità di cristalli sulla pelle

Gestione dell'umidità

- Conservare per una notte senza rimuovere i contenitori di cristalli
- Tendenza alla rottura minimizzata

- Risparmio di tempo grazie al basso impegno nella manutenzione

Comodo sistema di pulizia ad aria compressa

Autopulizia del circuito dei cristalli, compreso il filtro, dopo ogni trattamento

- Funzionamento senza problemi con un minimo sforzo per la pulizia del device
- Manutenzione ridotta al minimo

I cristalli REVIDERM

- la migliore qualità sul mercato (forma, superficie e dimensioni ottimali)
- Ideati appositamente per la tecnologia REVIDERM SkinPeeler

- Piacevole sensazione sulla pelle
- Trattamento controllato e sicuro
- Basso consumo (minore dei cristalli convenzionali)

CARATTERISTICHE

BENEFICI

Diverse tipologie di cappucci

Cappucci in metallo e plastica, in diverse dimensioni

· Il cappuccio è apposito e adatto per il trattamento che si va ad eseguire e per la zona da trattare

ULTRASOUNI

Manipoli

Possibilità di configurazione individuale degli ultrasuoni:
1 MHz: corpo
3 MHz: viso
10 MHz: viso e zona occhi

· **1,3 o 10 - qual è il vostro principale campo di applicazione degli ultrasuoni? Flessibile, adatto al vostro portafoglio di trattamenti e alla vostra clientela, potrete configurare il vostro SkinPeeler con i manipoli a ultrasuoni. Per trattamenti efficaci, precisi e ottimali.**

Sistema con ingresso per 2 manipoli

2 manipoli con gli stessi MHz possono essere collegati in parallelo

· **Grazie alle due connessioni, è possibile eseguire i trattamenti in modo più veloce e simultaneo usando due manipoli identici**
· **Permette di avere più spazio nell'agenda per un maggior numero di trattamenti, risparmiando tempo e aumentando il fatturato**

Opzioni individuali e personalizzabili

· Il lavoro può essere adattato facilmente
· Regolazione della potenza e della pulsazione su 4 livelli: 25, 50, 75, 100 %

· **Offrite ai vostri clienti il miglior risultato possibile, con un occhio di riguardo alla pelle e all'obiettivo del trattamento, grazie alla flessibilità delle impostazioni**

Programmi pre-impostati

· Differenti programmi per diverse esigenze dei clienti
· Programmi pre installati
· Funzione di mantenimento in memoria per i propri programmi

· **Migliori risultati di trattamento con programmi già pronti**
· **Consente il miglior trattamento possibile e individuale**
· **Soluzioni ottimali per ogni esigenza della pelle: per i vostri clienti e per la loro pelle, potete utilizzare la vostra esperienza per stabilire parametri ideali e personalizzati**
· **Grazie alle funzioni di memoria, è possibile accedere nuovamente ai programmi salvati singolarmente**


Risultati

Microdermoabrasione

Attraverso la rimozione controllata della pelle morta e cornea, lo strato cutaneo superiore viene assottigliato in modo mirato per un breve periodo di tempo. In questo modo si stimola la produzione di nuove cellule, che entrano in funzione rapidamente. L'aspetto della pelle cambia di conseguenza. Diventa più rosea e più giovane: al posto degli strati in eccesso di cellule morte ci sono nuove cellule metabolicamente attive. Il vacuum stimola lo strato sottostante (corium/derma). Promuove la produzione di nuovo Collagene ed Elastina. In questo modo, si percepisce che i tessuti vengono rassodati e tonificati in profondità.

Ultrasuoni

Non tutti gli ultrasuoni sono uguali. L'intensità, la frequenza e la pulsazione influiscono notevolmente sull'effetto. La frequenza (MHz) determina la profondità di penetrazione del suono. REVIDERM utilizza frequenze di 10 MHz, 3 MHz e 1 MHz. Più basso è il numero di MHz, più il suono penetra in profondità nei tessuti del corpo. Pertanto, le frequenze di 10 e 3 MHz sono particolarmente indicate per il trattamento del viso, mentre 1 MHz è utilizzato esclusivamente per il corpo. L'intensità (watt) determina la ricchezza energetica di un'onda sonora. O in altre parole: quanta energia viene introdotta nella pelle al secondo per centimetro quadrato. Più alto è il wattaggio, più intensa è la modalità d'azione. La pulsazione, ovvero il rapporto tra i tempi di impulso e di pausa, determina la modalità d'azione e gli effetti sulla pelle. In questo modo si può regolare se l'effetto è più meccanico, fisiochimico o termico. Un trattamento che utilizza le onde ultrasonore è molto piacevole e rilassante. Il suono in sé non è percettibile, ma alcuni clienti riferiscono una piacevole sensazione di calore.

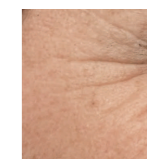

Prima

Rughe ed imperfezioni



Dopo


Pelle definita e ringiovanita

REVIDERM utilizza gli ultrasuoni a:

10 MHz – per trattamenti viso

3 MHz – per trattamenti viso


1 MHz – per trattamenti corpo

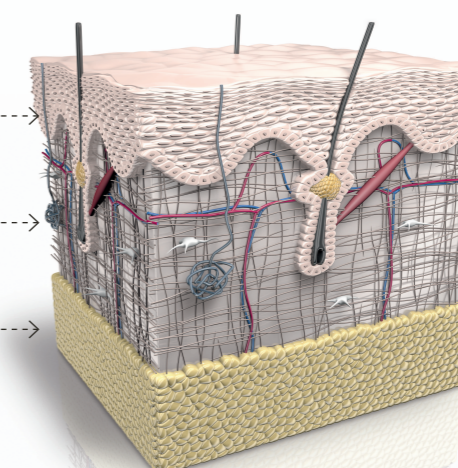

Effetti in profondità della MDA:

Effetto diretto


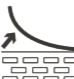


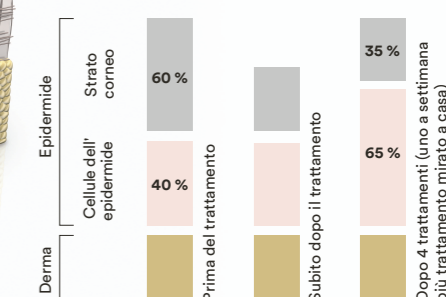




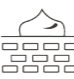

Effetto indiretto



REVIDERM

Microdermoabrasione - trattamento base

Trattamento di base con utilizzo di SkinPeeler per tutti i tipi di pelle. Pensato per l'ottimizzazione personalizzata della pelle in salute e come coadiuvante degli inestetismi cutanei.

Utilizzare <i>Cleansing Milk</i> e <i>2-Clean Eye</i> per rimuovere eventuale trucco occhi.		Detersione
Applicare <i>Enzyme Peeling Liquid</i> sul viso e collo con un pad di cotone asciutto. Seguire poi applicando, con un pennello a ventaglio, <i>Enzyme Peeling Paste</i> realizzando uno strato sottile sulla pelle. Lasciare asciugare (per capire se il prodotto è asciutto toccare la fronte con un polpastrello). Rimuovere il tutto a secco utilizzando i <i>Pagasing Swabs</i> applicando una certa pressione sulla pelle. Infine eliminare l'eccesso con una spugna imbibita con acqua fresca.		Fase Pre-Peel (Peeling Enzimatico)
Versare <i>Skin Prep Lotion</i> su un dischetto di cotone asciutto e strofinare delicatamente le aree da trattare.		Sgrassamento/Disinfezione
Coprire e proteggere gli occhi con <i>Eye Pads</i> .		Protezione occhi
1 round seguendo lo schema a scacchiera, 1 round seguendo lo schema "a gomma da cancellare". Per la tecnica di lavoro, vedere il capitolo "Tecnologia di microdermoabrasione".		Microdermoabrasione
Utilizzare una piccola spazzola morbida per rimuovere tutti i cristalli dalla pelle. Cambiare l'asciugamano sotto l'area di trattamento (o capovolgere l'asciugamano). Quindi pulire accuratamente con una spugna umida. Asciugare la pelle.		Detersione
Applicare <i>ECM Repair Concentrate HD</i> con il pennello a setole corte. Quindi picchiettare delicatamente sulla pelle fino a completo assorbimento.		Principio Attivo
Applicare <i>Calming Hydro Mask</i> con il pennello a ventaglio. Tempo di applicazione 15-20 minuti. Rimuovere i residui.		Maschera
Applicare il tonico <i>Thermal Tonic</i> con un dischetto di cotone.		Stabilizzazione
Applicare <i>Neuro Sensitive De-Stress Cream Rich</i> e massaggiare fino a completo assorbimento. Come ulteriore protezione della flora cutanea, applicare <i>Pro Microbiome Aged Skin</i> .		Step finale
		Trucco

TECNOLOGIE DA NON UTILIZZARE

Non combinare il *micro-needling* nello stesso trattamento.

TECNOLOGIE POSSIBILI

✓ Ultrasuoni



” **Grazie alla funzione 2 in1, lo SkinPeeler ti darà il massimo della soddisfazione sin dal primo utilizzo! I clienti vedono l'effetto subito dopo il trattamento e continuano a tornare!** “

Benida Turselji, REVIDERM
skinmedics Benida, Neufurth
(Austria)

Specifiche tecniche:

Dimensioni (H x W x D): circa. 51 x 27.5 x 26 cm

Peso: circa. 24 kg

Peso del manipo MDA
(senza il tubo): 78 g

Peso manipo ultrasuoni 1 MHz (senza cavo): 90 g

Peso manipo ultrasuoni 3 MHz (senza cavo): 70 g

Peso manipo ultrasuoni 10 MHz (senza cavo): 70 g

Vacuum: max. 0.93 bar

Frequenze US: 1 MHz, 3 MHz, 10 MHz

Potenza massima in uscita:
1 MHz: max. 1.5 W/cm² or max. 13 W
3 MHz: max. 2.5 W/cm² or max. 3 W
10 MHz: max. 2.5 W/cm² or max. 3 W

Modalità di trattamento: continua o con pulsazione liberamente selezionabile (0-100 %)

Area di trattamento:
1 MHz: circa. 8 cm² 3
MHz: circa. 2 cm² 10
MHz: circa. 2 cm²

Sicurezza: Classe dell'apparecchio I

Sicurezza: Classe dell'apparecchio I

Voltaggio principale/consumo:
230 V ± 10 %,
50-60 Hz, max. 400VA

Fusibili di rete: 250 V, 2 x 2.5 A

Un cuore. Un'anima.

Distribuito in Italia da:

Casa Wellness SNC di
Tino Chinaglia & C.
Via XX Settembre 90
45021, Badia Polesine (RO)
Tel. 0425 597128
Cell. 389 6423968
Mail.
info@casawellness.eu

www.reviderm.it